



Citadel Plus




Panel sterowania opiekuna

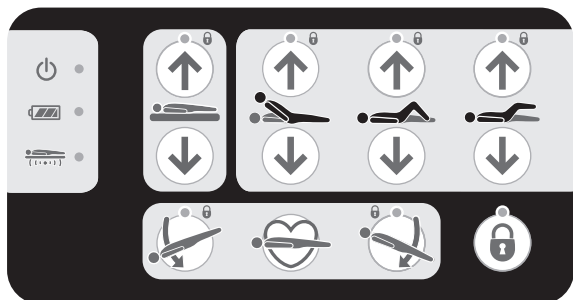


Panel sterowania dla pielęgniarki

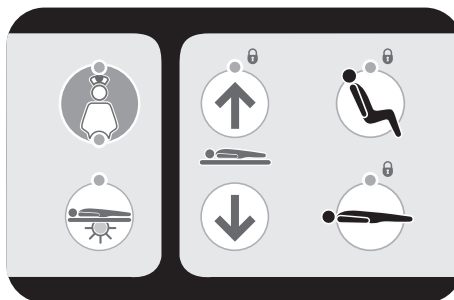

Pilot dla pacjenta

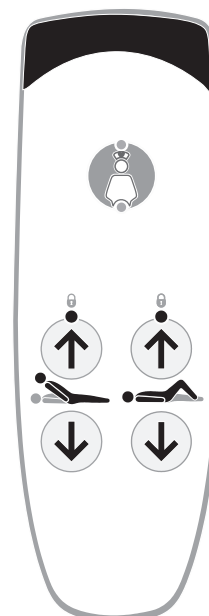

Panel sterowania dla pacjenta

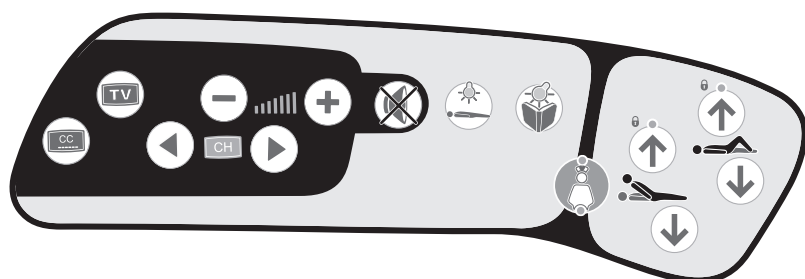

● Wskaźnik włączonego zasilania



● Wskaźnik LED statusu naładowania baterii



● Bateria w pełni naładowana



● Ładowanie akumulatora



● Bateria rozładowana



● Wskaźnik systemu antyzakleszczeniowego (AES) — kiedy się świeci, system AES jest aktywny, a obniżenie ramy wymaga najpierw usunięcia przeszkody.



● Wysokość platformy materaca — podnoszenie i obniżanie platformy materaca.



● Segment oparcia pleców — podnoszenie i obniżanie segmentu oparcia pleców.



● Segment podparcia ud — podnoszenie i obniżanie segmentu podparcia ud

● Segment podparcia łydek — podnoszenie i obniżanie segmentu podparcia łydek

● Obniżanie wezgielwia (pozycja Trendelenburga)

● Obniżanie strony nóg (odwrócona pozycja Trendelenburga)

● Pozycja CPR — spłaszczanie platformy materaca i zmniejszenie wysokości łóżka

● Blokada funkcji — nacisnąć ten przycisk, a następnie wybrany przycisk (przyciski) panelu sterowania dla opiekuna, aby zablokować/odblokować daną funkcję. Żółta kontrolka = blokada.



Automatyczne krzesło

(tylko na panelu sterowania dla pielęgniarki)
— Nacisnąć i przytrzymać, aby uzyskać pozycję krzesła.



Automatyczne opuszczenie krzesła

(tylko na panelu sterowania dla pielęgniarki)
— Nacisnąć i przytrzymać, aby powrócić na podłogę.



Oświetlenie pod łóżkiem

(panel sterowania dla pielęgniarki)



System wzywania pielęgniarki

(dostępny w wybranych modelach) —
Nacisnąć, aby wezwać pomoc.



Lampka do czytania

(dostępna w wybranych modelach) —
Nacisnąć, aby włączyć światło.



Lampka do czytania włączona/wyłączona

(funkcja dostępna w wybranych modelach)



Dźwięk włączony/wyłączony (wyciszenie)

(funkcja dostępna w wybranych modelach)



Ciszej

(funkcja dostępna w wybranych modelach)



Głośniej

(funkcja dostępna w wybranych modelach)



Kanał do przodu

(funkcja dostępna w wybranych modelach)



Kanał do tyłu

(funkcja dostępna w wybranych modelach)



Telewizor włączony/wyłączony



(funkcja dostępna w wybranych modelach)



Duże napisy włączone/wyłączone

(funkcja dostępna w wybranych modelach)

Panel sterowania wagą

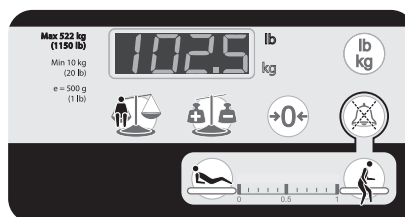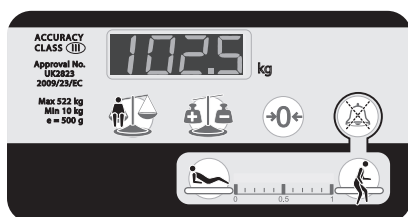

Zero — służy do resetowania systemu ważenia przy pierwszej konfiguracji łóżka oraz przed umieszczeniem na nim nowego pacjenta.



Autokompensacja — umożliwia położenie lub zdjęcie przedmiotów z łóżka bez wpływu na wyświetlaną wagę pacjenta.



Waga — wyświetla wynik pomiaru masy.



Wybór jednostek — pozwala wybrać jednostkę masy.



Przycisk wyciszania VariZone — wycisza sygnalizację wyjścia z łóżka na trzy minuty.

Próg wykrywania ruchu pacjenta — wskaźnik prezentuje wybraną czułość wykrywania ruchu pacjenta.



W łóżku — (re)aktywuje wykrywanie ruchu pacjenta oraz zwiększa czułość systemu.



Wyjście — (re)aktywuje wykrywanie ruchu pacjenta oraz zmniejsza czułość systemu.