



Citadel Plus




Personalmanöverpanel

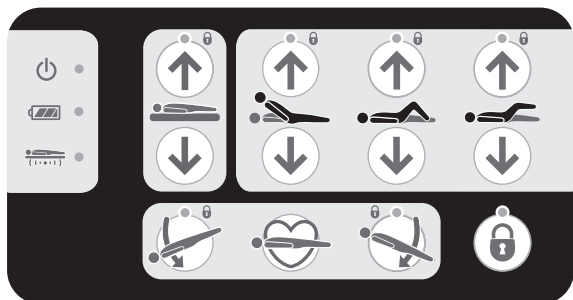


Sköterskemanöverpanel

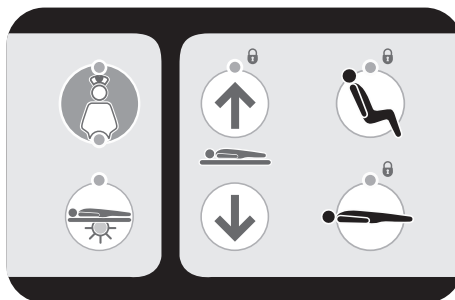

Patienthandset

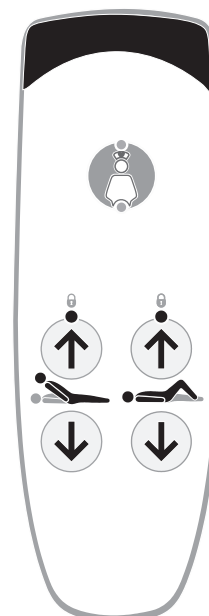

Patientmanöverpanel

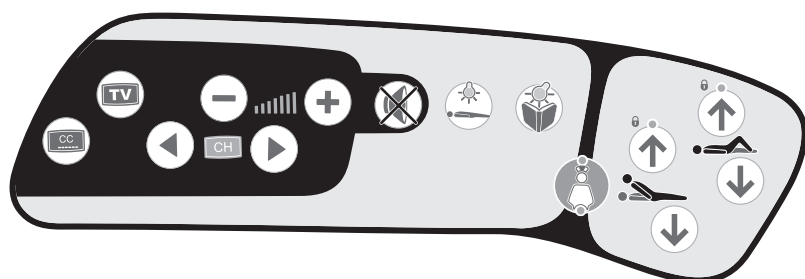

● **Strömindikator**



● **Lysdiodsindikator för batteristatus**



● Batteriet är fulladdat



● Laddning av batteri



● Batteriet är urladdat



● **Indikator för klämskyddssystem** – när den tänds har klämskyddssystemet aktiverats och ett hinder måste avlägsnas innan ramen kan sänkas.



● **Madrassplattformshöjd** – höja eller sänka madrassplattformen.



● **Ryggstödsinkel** – höja eller sänka ryggstödet.



● **Lårsektion** – höja eller sänka lårsektionen



● **Vadsektion** – höja eller sänka vadsektionen.



● **Sänka huvudänden** (Trendelenburg-läge)



● **Sänka fotänden** (omvänd Trendelenburg-läge)



● **HLR-läge** – gör madrassplattformen plan och sänker sängen.



● **Funktionslåsning** – tryck på knappen och tryck sedan på knappen/knapparna på personalmanöverpanelen för att låsa eller låsa upp funktionen. Gul lampa = låst.



Auto-Chair

(endast sköterskemanöverpanel) – håll intryckt för stolposition.



Auto-Chair ned

(endast sköterskemanöverpanel) – håll intryckt för plant och horisontellt läge



Belysning under sängen

(endast sköterskemanöverpanel)



Sköterskeanrop

(finns på utvalda modeller) – tryck för att begära assistans.



Läslampa

(finns på utvalda modeller) – tryck för att tända lampan.



Läslampa på/av

(finns på utvalda modeller)



Ljud på/av (tyst)

(finns på utvalda modeller)



Volym ned

(finns på utvalda modeller)



Volym upp

(finns på utvalda modeller)



Föregående kanal

(finns på utvalda modeller)



Nästa kanal

(finns på utvalda modeller)



TV på/av



(finns på utvalda modeller)



Undertexter på/av

(finns på utvalda modeller)

Manöverpanel för våg

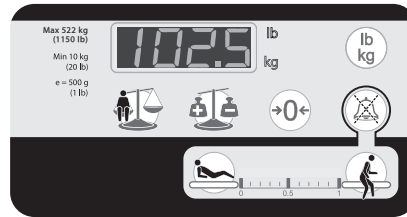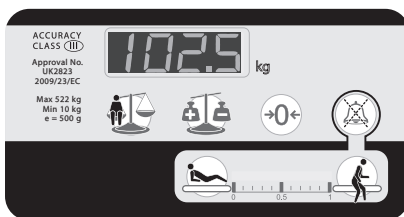

Nollställning – tryck för att nollställa vägningsystemet när sängen först ställs upp och innan en ny patient placeras i sängen.



Autokompensering – tryck för att möjliggöra att föremål läggs till i eller tas bort från sängen utan att det påverkar den angivna patientvikten.



Vikt – tryck för att visa vikt.



Välj måttenhet – tryck för att välja viktenhet.



VariZone-inaktiveringsknapp – tryck för att tysta urstigningslarmet under tre minuter.

Detekteringströskel för patientrörelser – en indikator visar vald känslighet för detektering av patientrörelser.



I sängen – tryck för att återaktivera eller aktivera detektering av patientrörelser och öka känsligheten.



Ur sängen – tryck för att återaktivera eller aktivera detektering av patientrörelser och minska känsligheten.