

# Tenor

## Z křesla na židli

**1**

Vak umístěte kolem těla pacienta/klienta. Nožní popruhy protáhněte mezi vnitřní strany steh. Ujistěte se, že vak není přeložený ani zkroucený.

**2**

Zvedák umístěte před pacienta/klienta. Pacientovy/klientovy nohy položte podle potřeby na podvozek nebo přes něj. Závěsné rameno nastavte do úrovně ramen.

**3**

Poutka vaku připněte správným způsobem k závěsnému ramenu. Před zvedáním pacienta/klienta se ujistěte, že je vak zajištěn v háčích.

**4**

Zvedněte pacienta/klienta.

**5**

Zvedák odsuňte od židle. Podle potřeby zavřete nohy podvozku. Přesuňte pacienta/klienta.

**6**

Umístěte pacienta/klienta nad židli. Opatrně ho spusťte do sedící polohy. Odpojte vak od zvedáku. Zvedák odsuňte od pacienta/klienta. Sejměte z pacienta/klienta vak.