

De la silla a la silla

1




Coloque el arnés alrededor del paciente. Coloque la correa para las piernas en la parte interna de los muslos. Asegúrese de que el arnés no está plegado o retorcido.

2




Coloque la grúa delante del paciente. Si es necesario, disponga las piernas del paciente en o sobre el chasis. Ajuste el bastidor a la altura de los hombros.

3

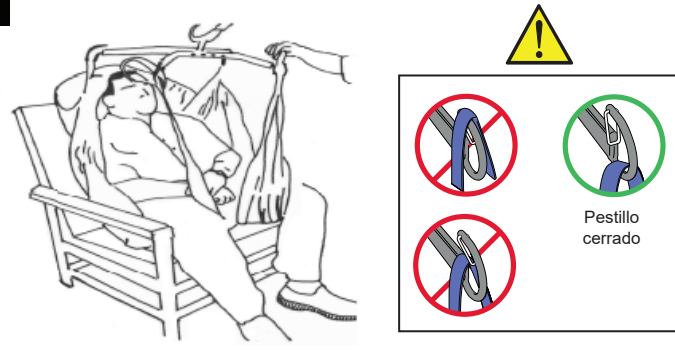


Fije los bucles del arnés al bastidor de forma correcta. Asegúrese de que el arnés está fijado a los ganchos antes de levantar al paciente.

4

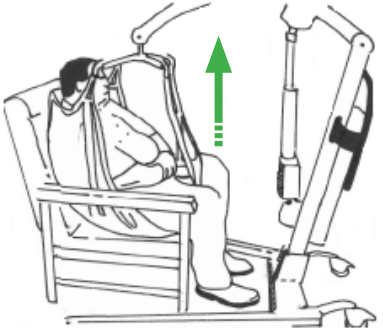


Eleve al paciente.

5

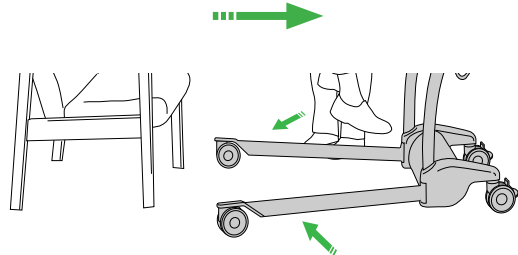

Aparte la grúa de la silla. Si procede, cierre las patas del chasis. Transfiera al paciente.

6

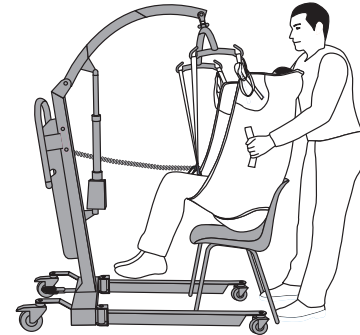

Coloque al paciente sobre la silla. Bájelo con cuidado a la posición de sentado. Separe el arnés de la grúa. Aleje la grúa del paciente. Retire el arnés del paciente.