



TOPPMATET BEKKENSPYLER

**Amigo™**

# En pålitelig bekkenspyler med flere funksjoner

Toppmatet bekkenspyler  
med integrert utslagsvask.

Bekkenspylerne i Amigo-serien kan brukes til å utføre en viktig dobbeltrolle i skyllerommet. Amigo ikke bare rengjør og desinfiserer en lang rekke sirkulasjonsgods som urinflasker og bekkener, den fungerer også som et tømme punkt for alle slags beholdere.

Amigo er en toppmatet enhet som er laget for tilgang i benkehøyde. Forsiden er lavere enn baksiden, slik at tilgangen blir bredere når lokket er åpent. Dermed blir den enkel å fylle, tømme og overvåke. Dette gjør det også enklere å tømme rengjøringsbøtter og andre store beholdere når Amigo brukes som en utslagsvask.



Amigo kan brukes til å rengjøre og desinfisere beholdere for menneskeavføring, i en lang rekke fasonger og størrelser.



### **Bruk Amigo til rengjøring og desinfisering**

Amigo har flere jetdyser som rengjør skitne gjenstander ved å sende vann med høyt trykk inn i kammeret. Etter rengjøringsfasen følger termisk dampdesinfisering, som eliminerer behovet for ytterligere kjemikalier. Dysene er strategisk plassert for å bidra til effektiv rengjøring og desinfisering av beholdere, innvendig og utvendig. Hele prosessen – fra tømning til rengjøring og desinfisering – tar bare 4-7 minutter.

Etter hver desinfiseringsfase desinfiseres alle deler av systemets innside – kammer, rør, dyser osv. – ved dampinnsprøyting med

funksjonen for desinfisering av rørsystemet (PSD). Når rengjørings-/desinfiseringsprosessen er fullført, åpnes lokket automatisk ca. 10 centimeter slik at tørke- og avkjølingsprosessen går fortere.

### **Bruk Amigo som en praktisk utslagsvask**

Den integrerte utslagsvasken er en praktisk måte å tømme og rengjøre beholdere på. Disse kan tømmes direkte, og innholdet skylles bort ved å trykke på spyleknappen. Etter at tømningen er fullført, fungerer Amigo også som en klinisk vask som bidrar ytterligere i desinfiseringsprotokollen.

# Viktige funksjoner og fordeler

## Toppmatet skyllekammer utformet for enkel tilgang

- Toppmatet utforming muliggjør tilgang i benkehøyde.
- Skrå front gir bredere tilgang når lokket er åpent, slik at det blir enkelt å fylle og tømme.
- Dypt kammer gir plass til større beholdere.
- Når rengjøringen/desinfiseringen er ferdig, åpnes lokket automatisk ca. 10 cm for raskere tørking og avkjøling.

## Integrert utslagsvask

- Kantspyling aktiveres ved å trykke på en knapp.
- Enheten fungerer som en praktisk utslagsvask for effektiv tømming av beholdere i ulike størrelser.
- Dreieenhet kan monteres som tilleggsutstyr for å snu beholderne automatisk og tømme dem, slik at behovet for manuell håndtering reduseres.

## Grundig rengjøring

- Strategisk plasserte, roterende sprøytedyser når og rengjør beholderne både innvendig og utvendig.
- Omfattende utvalg av holdere tilgjengelig til ulike typer gods og beholdere.





Fotpedalen er inkludert som en standardfunksjon og kan brukes til å åpne og lukke lokket, samt å starte de hyppigst brukte programmene.

### Berøringspanel med LCD-skjerm

- Amigos kontrollpanel har et enkelt grensesnitt og LCD-skjerm med følgende indikatorer og funksjonstaster:
  - Prosessen kjører
  - Prosessen er fullført
  - Alarmer
  - Kantskylling
  - Programvalg

### Enkelt programvalg


- Minne tilgjengelig for opptil 25 programmer.
- Fem programmerbare knapper aktiverer de hyppigst brukte programmene.
- De hyppigst brukte programmene kan aktiveres med pedal.

### Termisk dampdesinfisering

- Desinfiseringsdamp sprøytes inn gjennom alle rengjøringsdysene, som er strategisk plassert for å komme til både inne i og utenpå beholderne.
- System for rørdesinfisering (PSD)-funksjonen desinfiserer automatisk.

### Veggmontert eller frittstående

- Begge alternativene gir rom under maskinen slik at man kommer til for å vaske gulvet.

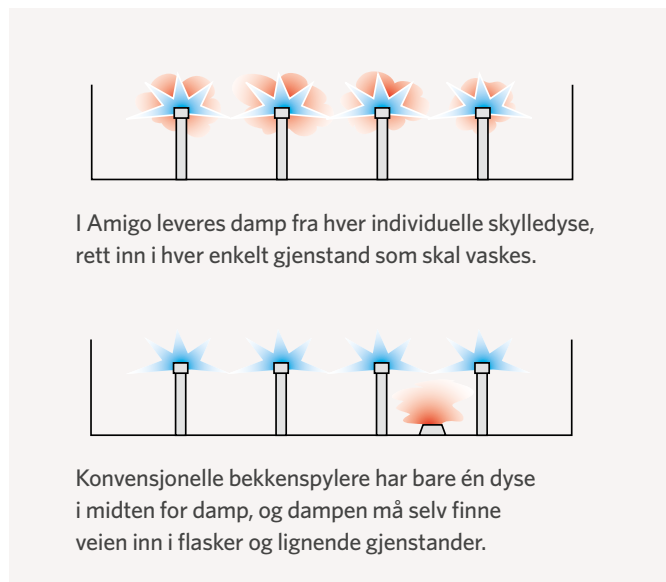

I Amigo leveres damp fra hver individuelle skylledyse, rett inn i hver enkelt gjenstand som skal vaskes.

Konvensjonelle bekkenspylere har bare én dyse i midten for damp, og dampen må selv finne veien inn i flasker og lignende gjenstander.

### Fotpedal støtter effektivitet og hygiene

- Trykk på fotpedalen for å åpne eller lukke lokket.
- Støtter håndfri drift for å redusere risikoen for kontaminering.
- Pedalen kan også brukes til å starte de hyppigst brukte programmene.

# Bedre effektivitet i skyllerommet

Amigo spiller en dobbeltrolle for en mer effektiv desinfiseringsprotokoll.

Et effektivt, godt planlagt skyllerom er avgjørende i helseinstitusjoners innsats for å sikre god hygiene og bekjempe trusselen fra kryssinfisering. Amigo har både rengjørings-/desinfiseringsfunksjon og funksjon for tømning av beholdere. Den spiller dermed en dobbeltrolle i å bidra til et effektivt system for infeksjonskontroll i institusjonen din.

## Design et bedre skyllerom

Amigo er en funksjonelt apparat som kan utføre flere oppgaver, og som enkelt kan integreres i skyllerommets design.

- Maskinens utslagsvask eliminerer behovet for en egen tømmeenhet, og sparer dermed tid, plass og penger.
- Toppmatet design sparer gulvplass ettersom lokket åpnes oppover.
- Amigo kan leveres som en veggmontert eller frittstående enhet. Begge alternativene gir rom under maskinen for enkel gulvvaske.


## Støtter et effektivt arbeidsmiljø

- En lett-programmerbar maskin med brukervennlig skjerm.
- Utformet for praktisk tilgang i benkehøyde, med skråstilt front som gir bredere åpning når lokket er åpent.
- Praktisk fotpedal som åpner/lukker lokket og støtter håndfri drift slik at risikoen for kontaminering reduseres.

Arjo kan hjelpe deg med å designe et effektivt skyllerom og fastsette en generell strategi for infeksjonskontroll.

Vi gir også detaljerte retningslinjer for plassbehov, ekspertinnsikt og nedlastbare ressurser. Kontakt din Arjo-representant eller se Arjos veiledning for arkitekter og planleggere på [arjo.com](http://arjo.com) for mer informasjon.

## Plassbehov

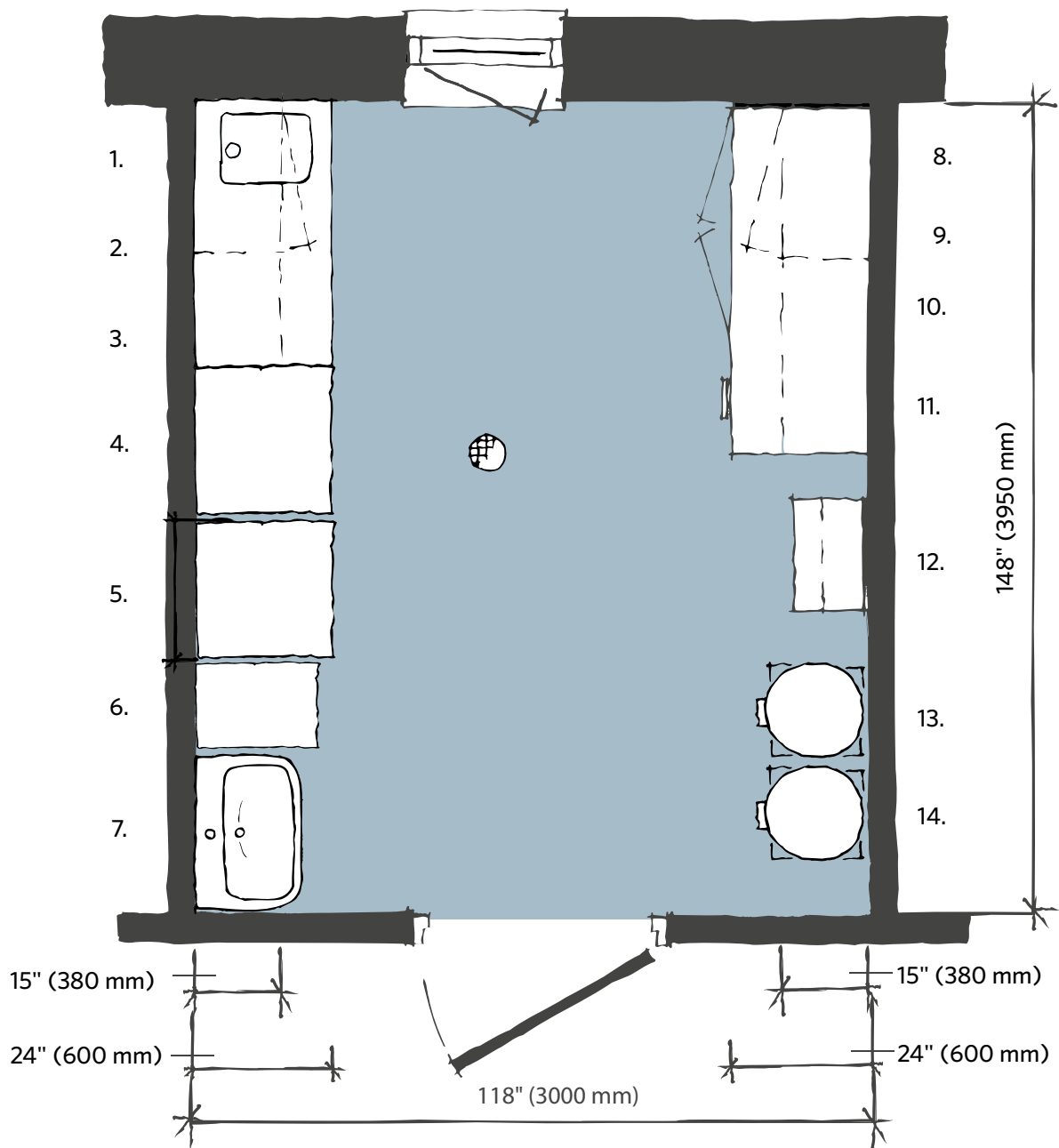

### Eksempel på oppsett for stort skyllerom

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Låsbart veggskap                        | 7. Håndvask med dispenser for flytende såpe og desinfeksjonsmiddel, papirhåndklær og søppelbøtte | 11. Ren oppbevaringshylle              |
| 2. Servantenhet med avlastningsbord        | 8. Nedre låsbare skap  | 12. Rengjøringsutstyr for skyllerommet |
| 3. Hyller i rustfritt stål                 | 9. Arbeidsbenk   | 13. Poseholder for skittentøy          |
| 4. Vaskedesinfektor for utstyr             | 10. Oppvarmet oppbevaringsskap   | 14. Poseholder for avfall              |
| 5. Spyledekontaminator                     |  |  |
| 6. Utslagsvask for tømning av store bøtter |  |  |

# Amigo

## PRODUKTOPPLYSNINGER

Vekt	85 kg (187 lbs)
Bredde	590 mm (23 ¼")
Dybde	660 mm (26")
Høyde	1000-1060 mm (39 ½-41 ¾")
Avløpstilkobling	Ø 90mm (3 ½") eller 110 mm (4 ½") gulv/veggkobling
Strømforbruk	0,16 kWt/syklus
Maks utvendig temperatur	40° C
Støynivå	59 dB (A)
<b>Tilkobling av vann</b>	
Kaldt vann	15 mm (½"), 70-800 kPa, 20 l/min
Varmt vann	45-60°C, 15 mm (½"), 70-800 kPa, 20 l/min
Damping	15 mm (½"), 30-300 kPa, 0,3 kg/syklus
<b>Vannforbruk (uten kjøling*)</b>	
Økonomiprogram	18 l/syklus
Normalt program	29 l/syklus
Intensivt program	36 l/syklus
<b>Elektrisk tilkobling</b>	
L1:	230V, 1N+PE, 50Hz, 1x20A, 4,3 kW
L2:	230V, 3N+PE, 50Hz, 1x16A, 5,5 kW
L3:	400V, 3N+PE, 50Hz, 3x10A, 5,5 kW

Flere elektriske koblinger er tilgjengelig

Dimensjoner og spesifikasjoner for skap som passer til Amigo, er tilgjengelig på forespørsel

\* Kjøling ca. 6 l.

© Arjo, September 2019.

Utstyr og produkter som leveres av Arjo krever bruk av originale deler fra Arjo, som er laget spesielt for formålet. Vår policy er å drive en kontinuerlig produktutvikling, og vi forbeholder oss derfor retten til å endre design og spesifikasjoner uten forutgående varsel.

I Arjo forplikter vi oss til å forbedre dagliglivet til mennesker med redusert bevegelighet og aldersrelaterte helseutfordringer. Vi leverer produkter og løsninger som sikrer ergonomisk pasienthåndtering, personlig hygiene, desinfisering, diagnostikk og effektiv forebygging av trykksår og venøs tromboembolisme, som hjelper fagfolk i alle typer pleiemiljø med hele tiden å heve standarden for sikker og verdig pleie. Alt vi gjør, gjøres med mennesker i fokus.

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500  
Arjo Norge AS • Olaf Helsetts vei 5 • 0694 • Oslo • Norway • +47 22 08 00 50

[www.arjo.no](http://www.arjo.no)