

CAMILLA GRÚA DE BAÑO DE ALTURA REGULABLE

Bolero



La Bolero es una camilla grúa de baño de altura regulable que se puede utilizar para transportar, transferir dentro y fuera de la bañera, y bañar a pacientes dependientes en posición reclinada o totalmente tumbada.

MOBILITY GALLERY DE ARJO



D



E

Diseñada para favorecer el flujo de trabajo en el baño

La camilla de altura regulable cuenta con una cómoda superficie acolchada. Permite a un solo cuidador trasladar con seguridad y eficiencia a un residente directamente desde la cama o el baño a la bañera, y viceversa, sin necesidad de elevación manual ni transferencias adicionales. Esto proporciona una alternativa eficiente y más ergonómica al baño en la cama.

Diseño simétrico y colchón plegable para mayor flexibilidad

La Bolero tiene un diseño simétrico, lo que permite utilizar cualquiera de los extremos como respaldo, dependiendo de la posición de la cama del residente. Junto con el colchón plegable que facilita el almacenamiento, la camilla Bolero ofrece flexibilidad y la capacidad de adaptarse a las diferentes necesidades de residentes, cuidadores y centros.

Compatible con una amplia gama de necesidades y alturas de los residentes

El respaldo ajustable permite adoptar una posición desde erguida hasta totalmente reclinada. La longitud de la camilla también puede acortarse ajustando el soporte para la cabeza y los pies a fin de optimizar su uso para pacientes más bajos.

Características principales

La Bolero está disponible en dos versiones: hidráulica o eléctrica.

ASIDEROS DE DIRECCIÓN

Para manejar la camilla grúa de baño

COJÍN PARA EL CUELLO

Soporte y comodidad para el residente

COLCHÓN BLANDO

Para mejorar la comodidad del residente

SOPORTE LATERAL PLEGABLE (OPCIONAL)

Para mejorar la seguridad del residente, reducir el riesgo de caídas y mejorar su comodidad

PEDAL DE FRENO

Aplicable manualmente en todas las ruedas

ALTURA REGULABLE

Para una postura de trabajo ergonómica

ASIDEROS DE POSICIONAMIENTO

Para maniobrar y colocar la camilla grúa de baño junto a la cama/bañera

MANDO DE CONTROL

Para ajustar la altura del equipo

ASIDEROS

Para que los residentes puedan apoyar las manos y mejorar la seguridad

SOPORTE PARA LA CABEZA Y LOS PIES

Regulable, para poder acortar la longitud de la camilla

BÁSCULA DE PIE (OPCIONAL)

Para un pesaje sencillo del residente




INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	BOLERO ELÉCTRICA	BOLERO HIDRÁULICA
Peso máx. del paciente, CTS	136 kg	136 kg
Peso total de la grúa (grúa + báscula)	78 kg	69 kg
Anchura total	860 mm	860 mm
Anchura total de la camilla	446 mm	446 mm
Longitud total de la camilla en plano	1970 mm	1970 mm
Longitud total de la camilla plegada hacia arriba (almacenamiento)	1000 mm	1000 mm
Altura mín. de la camilla	515 mm	515 mm
Altura máx. de la camilla	1080 mm	1015 mm
Altura mín. del equipo	1165 mm	1150 mm
Altura máx. del equipo	1730 mm	1650 mm
Anchura máx. del chasis	1000 mm	1000 mm
Anchura mín. del chasis entre las patas	499 mm	499 mm
Longitud máx. del chasis	823 mm	823 mm
Radio de giro (camilla en plano)	2030 mm	2030 mm
Rango de elevación	565 mm	500 mm

ACCESORIOS	
Correas de seguridad	Para garantizar la seguridad del paciente. La Bolero incluye dos correas de seguridad: una para el pecho y otra para la cadera. Utilícelas según las necesidades del residente.
Baterías y cargador de 24 V	Sistema de baterías de sustitución rápida con dos baterías, lo que garantiza su disponibilidad en todo momento.
Soporte lateral (opcional)	Para reducir el riesgo de que el residente se caiga de la camilla y mejorar su comodidad.
Báscula (opcional)	Báscula accionada con el pie para pesar al residente.

REQUISITOS DE ESPACIO

- El área azul indica la superficie de trabajo mínima para que el personal pueda utilizar las ayudas mecánicas de manera ergonómica desde un lado.
- El área azul claro indica la extensión de superficie de trabajo requerida para facilitar las tareas desde cada lado a fin de ofrecer acceso adecuado.

Para obtener más información sobre los requisitos de instalación, visite el portal para arquitectos en www.arjo.com

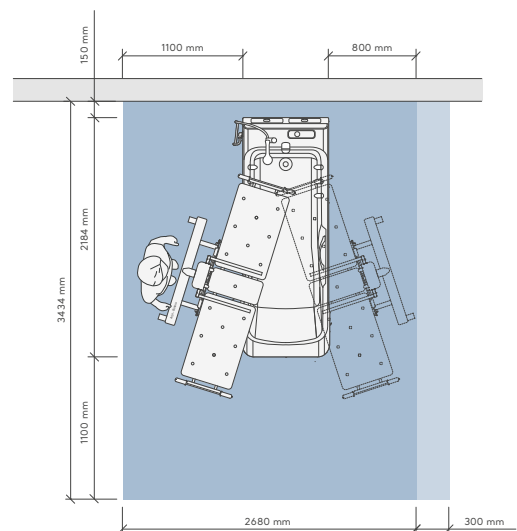

Marzo de 2023. En los equipos y productos suministrados por Arjo, solo deberán usarse piezas diseñadas por Arjo destinadas específicamente a ese fin. Debido a nuestra filosofía de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a modificar los diseños y las especificaciones sin previo aviso. ® y ™ son marcas registradas pertenecientes al grupo de empresas Arjo.

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
ARJO IBERIA SL • Calle Cabanyes, 1-7, Pol. Ind. Can Salvatella • 08210 • Barberá del Vallés (Barcelona) • España • +34 900 921 850

Arjo.A00651.1.0.ES.ES

arjo