

## Carevo®



S patentovanými zónami Flexi Zone a Ergo Access Area

Sprchový vozík Carevo je navržen tak, aby pacientům či klientům, kteří musí zůstat v poloze vleže, poskytoval příjemný zážitek ze sprchování a zároveň umožnil ošetřujícímu personálu pracovat efektivním a ergonomickým způsobem.

### Navržen pro pohodlí pacienta/klienta

Povrch z měkkého materiálu a patentovaná zóna Flexi Zone zvyšují pohodlí pacienta či klienta po celou dobu provádění hygieny.

### Univerzální ovládací panel

Viditelně označené ovládací panely se nacházejí na obou stranách a v záhlaví vozíku pro snadný přístup ošetřujícího personálu.

### Vyšší bezpečnost pacienta/klienta

Přidržovací madla poskytují klientům či pacientům oporu, dodávají jim větší pocit bezpečí a podporují jejich zapojení.

Navržen s ohledem na potřeby Emmy.\*



Emma má obtíže se udržet v poloze vsedě, proto může být částečně/trvale upoutána na lůžko a sedět dokáže jen ve speciálním křesle.

\* Toto je interní kategorizace vytvořená společností Arjo na základě EU ISO standardů, která může pomoci při určení úrovně mobility člověka. Kategorizace neslouží v žádném případě ke stanovení diagnózy. V případě nejasností nás prosím kontaktujte. Použití konkrétních jmen je pouze ilustrační a neodkazuje na skutečné osoby ani jejich stav.

### Lepší pracovní poloha

Výškové nastavení a patentované oblasti Ergo-Access Area dovolují ošetřujícímu personálu se více pacientovi/klientovi přiblížit a přitom zůstat v pohodlné pracovní poloze.

Toto zařízení je určeno pro asistovanou hygienickou péči, obzvláště pro svlékání, oblékání a sprchování klientů v pečovatelských prostředích, jako jsou pečovatelské ústavy pro seniory, komunitní pečovatelské domy, ústavy speciální péče, sanatoria, nemocnice a domácí péče. Sprchový vozík Carevo je určen pro používání náležitě vyškoleným pečovatelským personálem, který je přiměřeně znalý pečovatelského prostředí, běžných postupů a procedur, a v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití. Přesun klienta na sprchový vozík a z vozíku Carevo lze provádět pomocí stropního zvedáku, mobilního pasivního zvedáku nebo bočního přesunu z lůžka a zpět pomocí vhodné smýkáčkové pomůcky (např. MaxiSlide Sheet). Sprchový vozík Carevo by měl být používán pouze pro účely uvedené v návodu k použití. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Doporučujeme, aby pečovatelská zařízení zavedla do praxe pravidelné posuzování. Ošetřovatelský personál by měl nejprve jednotlivé klienty posoudit podle následujících kritérií:

- Tento produkt je určen hlavně pro pasivní klienty a klienty zcela odkázané na cizí péči. Aby klient mohl na sprchovém vozíku Carevo setrvat v bezpečné ležící poloze, musí být schopen omezeného pohybu nebo musí rozumět pokynům a reagovat na pokyny, aby v takové poloze setrval. Pokud klient nespĺňuje tato kritéria, je nutné použít alternativní zařízení nebo systém.
- Před přesunem klienta a další manipulací s klientem musí být provedeno posouzení klienta a prostředí, aby byl k dispozici personál a vybavení v souladu s požadavky příslušných úkonů.
- Hmotnost klienta by neměla překročit 182 kg.
- Tento produkt je určen pro klienty vyšší než 120 cm.

📌 Toto je reklama na zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k jeho použití, který obsahuje také informace k bezpečnému používání a další varování ve vztahu k prostředku.

# Klíčové funkce

**INTEGROVANÉ PŘIDRŽOVACÍ MADLO**

**INTEGROVANÉ DRŽÁKY RUKOJETI SPRCHY**

**SKLOPNÉ BEZPEČNOSTNÍ POSTRANICE**

**MĚKKÁ ODSTRANITELNÁ MATRACE**

**FLEXI ZONE**

Navržena tak, aby se přizpůsobila tvaru těla pacienta či klienta a vylepšila tak jejich pohodlí.

**MĚKKÝ HLAVOVÝ POLŠTÁŘ**

**NASTAVITELNÁ ZÁDOVÁ OPĚRKA**

**ERGO-ACCESS AREA**  
Flexibilně se přizpůsobí, aby umožnila bližší přístup k pacientovi či klientovi.

**INTEGROVANÉ OVLÁDACÍ PANELE**

**ELEKTRICKÉ NASTAVENÍ VÝŠKY**

**BRZDY NA VŠECH ČTYŘECH KOLEČKÁCH**



**VAROVÁNÍ:** Z důvodu ochrany před elektrickým přehřátím nastavitelné zádové opěrky sprchového vozíku Carevo při neustálém sklápění a zvedání tuto operaci provádějte maximálně po dobu 2 minut. Další sklopení nebo zvednutí zádové opěrky můžete provést až za 6 minut.

**VAROVÁNÍ:** Abyste zabránili nebezpečí výbuchu nebo požáru, nikdy nepoužívejte zařízení v prostředí s nadměrným obsahem kyslíku, v přítomnosti zdrojů teplot nebo hořlavých anestetických plynů.

**VAROVÁNÍ:** Z důvodu ochrany před převrnutím používaného zařízení nezvedejte či nespouštějte jiné zařízení v jeho blízkosti a dávejte při spuštění pozor na stacionární objekty.

**VAROVÁNÍ:** Bezdrátová komunikační zařízení, jako jsou bezdrátová počítačová síťová zařízení, mobilní telefony, bezdrátové telefony nebo jiné základní stanice, malé vysílačky atd., mohou toto zařízení ovlivnit a je třeba je udržovat ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od něj.

**VAROVÁNÍ:** Vyvarujte se používání tohoto zařízení v blízkosti jiného zařízení nebo na jiném zařízení, protože by to mohlo způsobit nesprávný provoz. Pokud je takovéto použití nezbytné, toto zařízení i druhé zařízení je třeba pozorovat, aby byl zajištěn správný provoz.

## INFORMACE O VÝROBKU

Max. bezpečné pracovní zatížení pacient/klient + voda 200 kg

Max. hmotnost pacienta/klienta 182 kg

Hmotnost (vč. matrace) 82 kg

Celková délka 2 005 mm

Šířka (lehátko) 586 mm

Celková šířka (vč. postranic) 759 mm - 888 mm

Délka podvozku 1 211 mm

Šířka podvozku 700 mm

Výška od podlahy k lehátku v horní poloze 955 mm

Výška od podlahy k lehátku v dolní poloze 605 mm

Zdvih 350 mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hlavový polštář

Klínový polštář

Matrace

Vypouštěcí hadice


Nabíječka baterie a baterie

Dezinfekční prostředek na povrchy

Další informace o našem příslušenství získáte od místního obchodního zástupce nebo na webu [www.arjo.com/cs-cz](http://www.arjo.com/cs-cz).

## PROSTOROVÉ POŽADAVKY

- Modré oblasti vymezují požadovaný pracovní prostor pro usnadnění hygieny a přesunu při zajištění odpovídajícího přístupu k pacientovi/klientovi, zařízení a pomoci ošetřujícímu personálu.

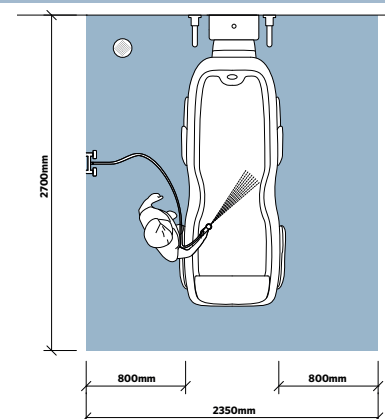

Návod k použití na [www.arjo.com/cs-cz](http://www.arjo.com/cs-cz) a v menu stránek pokračujte: Výrobky > Hygiena > Sprchové systémy > Carevo > Stahování

©Arjo AB, leden 2022. U zařízení a výrobků dodaných společností Arjo použijte pouze Arjo součásti, tj. díly speciálně konstruované pro daný účel. Jelikož je naší zásadou trvalý rozvoj, vyhrazujeme si právo provádět změny designu, vlastností a specifikací inzerovaného typu zdravotnického prostředku bez předchozího upozornění. ® a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo.

Výrobce: ArjoHuntleigh AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Švédsko · reg. č.: 556304-2026 · +46 10 335 4500  
Lokální distributor: Arjo Czech Republic s.r.o. · Na Strži 1702/65 · 140 00 Praha 4 · Česká Republika · IČO: 469 62 549 · +420 225 092 388

Arjo.Carevo.Flyer.1.1.CZ.HCP

**arjo**