

Classic Line[®] 2

Nová vana Classic Line[®] 2 je součástí kompletního řešení pro asistované koupání, které přispívá k větší pohodě a bezpečí klientů i ošetřujícího personálu. Hygienický systém je kompatibilní s mobilními i koupelovými zvedáky Arjo a umožňuje koupel klientů s různou úrovní mobility.



Navržena s ohledem na potřeby Alberta, Barbary, Carla, Doris a Emmy.*

- A** Albert je schopen provádět denní aktivity samostatně bez pomoci jiné osoby. Může používat hůl/berli jako oporu.
- B** Barbara je schopná chůze, ale používá chodítko/berle jako oporu.
- C** Carl je schopen částečně zatížit alespoň jednu končetinu, ale jinak se pohybuje na invalidním vozíku.
- D** Doris není schopna unést nohama vlastní váhu. Může sedět, má-li dostatečnou oporu.
- E** Emma má obtíže se udržet v poloze vsedě, proto může být částečně/trvale upoutána na lůžko a sedět dokáže jen ve speciálním křesle.

* Toto je interní kategorizace vytvořená společností Arjo na základě EU ISO standardů, která může pomoci při určení úrovně mobility člověka. Kategorizace neslouží v žádném případě ke stanovení diagnózy. V případě nejasností nás prosím kontaktujte. Použití konkrétních jmen je pouze ilustrační a neodkazuje na skutečné osoby ani jejich stav.

Zaručuje spolehlivost a bezpečnost

Aby koupel byla pro klienta bezpečná a aby pro něj byla uvolňujícím zážitkem, nabízí vana Classic Line 2 hned několik bezpečnostních funkcí. Patří mezi ně trojí ochrana proti opaření, zobrazení teploty vody, nouzové zastavení a spouštění a zablokování ovládacího panelu. Součástí hygienického systému je i volitelný integrovaný dezinfekční systém a systematické proplachování vodou, které pomáhají chránit klienta před křížovou infekcí.

Zesílené prospěšné účinky

Design snádechem domáckosti může pomoci vytvořit pohodlné a důvěrně známé prostředí. K volitelným funkcím patří i perličková koupel AirSpa[™], která může ještě vylepšit celkový zážitek z koupání.

Umožňuje použití jediným ošetřovatelem

Vana Classic Line 2 je kompatibilní s mobilními i koupelovými zvedáky Arjo a umožňuje jedinému ošetřovateli plynule provádět veškeré úkony spojené s koupáním klientů s různou úrovní mobility. Možnost výškového nastavení vany zajišťuje, aby ošetřující personál mohl provádět koupel klienta v ergonomické a bezpečné pracovní poloze a mohl se plně soustředit na péči o něj.

Vana Classic Line 2 je určena ke koupeli a sprchování pacientů v nemocnicích a klientů v zařízeních dlouhodobé péče pod dohledem školeného ošetřujícího personálu v souladu s pokyny obsaženými v návodu k použití. Vana Classic Line 2 musí být dezinfikována podle pokynu v návodu. Vana Classic Line 2 by měla být používána pouze pro účely vymezené v návodu k použití. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Vana je určena k provádění běžných hygienických úkonů, k relaxaci a hydroterapii za účelem úlevy od bolesti.

1 Toto je reklama na zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k jeho použití, který obsahuje také informace k bezpečnému používání a další varování ve vztahu k prostředku.

VAROVÁNÍ

Abyste zabránili nebezpečí výbuchu nebo požáru, nikdy nepoužívejte zařízení v prostředí s nadměrným obsahem kyslíku, v přítomnosti zdrojů tepla nebo hořlavých anestetických plynů.

VAROVÁNÍ

Bezdrátová komunikační zařízení, jako jsou bezdrátová počítačová síťová zařízení, mobilní telefony, bezdrátové telefony nebo jiné základny, malé vysílačky atd., mohou toto zařízení ovlivnit a je třeba je udržovat ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od něj.

VAROVÁNÍ

Vyvarujte se používání tohoto zařízení v blízkosti jiného zařízení nebo na jiném zařízení, protože by to mohlo způsobit nesprávný provoz. Pokud je takovéto použití nezbytné, toto zařízení i druhé zařízení je třeba pozorovat, aby byl zajištěn správný provoz.

VAROVÁNÍ

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nikdy v blízkosti tohoto zařízení nepoužívejte jiná elektrická zařízení, než jsou specifikována v návodu k použití.

VAROVÁNÍ

Abyste nedošlo k úrazu el. proudem, musí být zařízení vždy připojeno k:

- trvalému napájení z uzemněné el. zásuvky;
- samostatné pojistce a proudovému jističi;
- zařízení pro odpojení od sítě.

Všechny instalace musí být v souladu s místními zákony a předpisy.

Klíčové funkce

TROJÍ OCHRANA PROTI OPAŘENÍ

Zastaví přívod vody, pokud její teplota překročí bezpečnou hodnotu.

NOUZOVÉ SPOUŠTĚNÍ (VOLITELNÉ)

V případě výpadku proudu lze vanu snížit a bezpečně přesunout klienta z vany.

PERLIČKOVÁ KOUPEL AIRSPA (VOLITELNÁ)

Terapeutický systém AirSpa™ vlní 10 strategicky rozmístěnými tryskami do vany vzduch různé intenzity, který má uvolňující a masážní účinek.

SYSTEMATICKÉ PROPLACHOVÁNÍ VODOU

Potrubí je automaticky proplachováno v intervalu 24 hodin, aby v něm voda nezůstávala příliš dlouho a aby se snížila možnost množení bakterií.



BOČNÍ KRYTY ZAKŘIVENÉ DOVNITŘ

Kryty se zakřivením dovnitř poskytují dodatečný prostor pro kolena ošetřujícího personálu a umožňují mu se co nejvíce přiblížit ke klientovi.



INTEGROVANÝ ČISTIČÍ A DEZINFEKČNÍ SYSTÉM (VOLITELNÝ)

Ošetřujícímu personálu umožňuje vyčistit a vydezinfikovat po koupeli vanu i pomůcky použité k přesunu.



VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ

Umožňuje, aby koupel klienta mohl provádět jediný ošetřovatel v ergonomické a bezpečné pracovní poloze.

INFORMACE O VÝROBKU

Max. bezpečné pracovní zatížení - SWL (klient + voda)	415 kg
Maximální hmotnost klienta	182 kg
Celková hmotnost bez obalu	141 kg
Celková délka (vnější)	2 185 mm
Celková šířka (vnější)	780 mm
Celková délka (vnitřní)	1 885 mm
Celková šířka (vnitřní nejširší místo)	665 mm
Min. výška od okraje vany	730 mm
Max. výška od okraje vany	1 030 mm
Obsah vody do úrovně přepadu	300 l
Doba napouštění až k úrovní autonapouštění při dynamickém tlaku 3 000 kPa (TUV 80 °C)	4 min 40 s
Doba napouštění až k úrovní přepadu při dynamickém tlaku 3 000 kPa (TUV 80 °C)	7 min 40 s
Doba vypuštění z úrovně přepadu	8 min 12 s v nízké pozici nebo 6 min ve vysoké pozici
Maximální statický tlak vody	6 bar (600 kPa, 87 psi)
Minimální statický tlak vody	1 bar (100 kPa, 14,5 psi)
Třída IP podle IEC 60529	IPX4

KOMBINACE SE ZVEDÁKY ARJO

Alenti, Calypso, Miranti, Bolero, Maxi Move* a Maxi Sky*
*Bez velkého závěsného ramene

Další informace o našem příslušenství získáte od místního obchodního zástupce nebo na webu www.arjo.com/cs-cz.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Výškově nastavitelná
- Třístupňová ochrana proti opaření
- Termostatický směšovač
- Zobrazení teploty vody při napouštění/sprchování a ve vaně
- Systematické proplachování vodou
- Nouzové zastavení
- Zablokování funkcí na ovládacím panelu
- Přepad
- Madla
- Opěrka nohou / nástavec pro zkrácení vany

VOLITELNÉ VYBAVENÍ


- Integrovaný čistící a dezinfekční systém
- Perličková koupel AirSpa™ (10 trysek / 2 úrovně intenzity)
- Nouzové spouštění
- Speciální barva dle RAL

PŘÍSLUŠENSTVÍ / SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- Polštář
- Koupací plášť a župan
- Dezinfekční prostředky

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

- Modrá oblast označuje požadovaný pracovní prostor, který umožní provádět přesuny a hygienické úkony a poskytnout dostatečný přístup klienta, zařízení i ošetřující personál z jedné strany.
- Světle modrá oblast znázorňuje požadované rozšíření pracovního prostoru, které zajistí odpovídající přístup pro práci z obou stran.

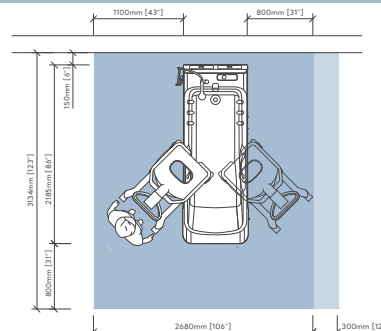

Návod k použití na www.arjo.com/cs-cz a v menu stránek pokračujte: Výrobky > Hygiena > Koupací systémy > Classic Line 2 > Stahování

©Arjo AB, Listopad 2021. U zařízení a výrobků dodaných společností Arjo použijte pouze Arjo součásti, tj. díly speciálně konstruované pro daný účel. Jelikož je naší zásadou trvalý rozvoj, vyhraujeme si právo provádět změny designu, vlastností a specifikací inzerovaného typu zdravotnického prostředku bez předchozího upozornění. ® a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo.

Výrobce: ArjoHuntleigh AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Švédsko · reg. č.: 556304-2026 · +46 10 335 4500
Lokální distributor: Arjo Czech Republic s.r.o. · Na Strži 1702/65 · 140 00 Praha 4 · Česká Republika · IČO: 469 62 549 · +420 225 092 388
Arjo.ClassicLine2.HCP.leaflet.Min.CZ.CZ.pdf.01

arjo