

Concerto ja Basic



Concerto ja Basic auttavat tehostamaan hoitajasta riippuvaisten potilaiden ja makuuasennossa olevien potilaiden suihku- ja hygieniarutiineja.

ARJO MOBILITY GALLERY

Sopii vanhustenhoitoon, akuuttiin hoitoon ja erikoissairaanhitoon.

Suunniteltu Emmaa ajatellen. Emma, joka on lähes kokonaan vuoteenoma ja täysin hoitajasta riippuvainen



E

© Arjo 2021

Concerto- ja Basic-suihkuvaunuja voidaan käyttää potilaan siirtämiseen sängyn reunalta sivuttaissiirtona, tai niitä voidaan käyttää yhdessä erilaisten katonostintemme ja passiivisten lattianostinten kanssa. Kun potilas on turvallisesti suihkuvaunussa, hänet voidaan kuljettaa suoraan suihkuun ja takaisin ilman manuaalista nostamista, mikä vähentää hoitohenkilökunnan työtaakkaa.

Korkeussäädettävä

Sekä Concerto- että Basic-suihkuvaunut ovat korkeussäädettäviä, joten hoitaja pystyy työskentelemään haluamallaan korkeudella. Korkeudensäätö toimii hydraulipumpulla. Concerto on saatavana myös sähköisenä mallina.

Mukavuus ja potilaan sijoittaminen

Mukavuuden ja riittävän tuen varmistamiseksi ja potilaan sijoittamisen helpottamiseksi Concerto- ja Basic-suihkuvaunuissa on pehmustettu patja, päätyyny ja kolmiotyyne. Concerto-suihkuvaunussa on myös selkätuki, jonka voi säätää kolmeen eri asentoon.

Sivutuet

Taitettavat sivutuet voidaan laskea helpottamaan sivusuunnassa siirtymistä ja nostaa tukemaan potilasta. Nostetut sivutuet voidaan lukita paikalleen kaksoisturvasalvoilla.

Puhdistus ja tyhjennys

Sekä Concerto- että Basic-suihkuvaunuissa on pehmustetut patjat, joissa on viemärointi ja poistokanavat sekä poistoletku ja tyhjennystulppa. Poistoletkun integroitu pidike pitää sen poissa tieltä kuljetuksen aikana. Concerto-suihkuvaunua voidaan myös kallistaa sivusuunnassa, mikä helpottaa sen puhdistusta ja kuivausta.

Ohjaaminen

Concerto- ja Basic-suihkuvaunujen kaikissa neljässä pyörässä on turvajarrut. Concerto-mallissa on lisäksi suora-ajo kahdessa pyörässä helpottamaan kuljetusta käytävillä ja automaattinen horisontaalinen taseus, kun vaunu lasketaan kiinni sänkyyn.

Koot

Concertosta on saatavana kolme eri pituutta: 1600 mm, 1900 mm ja 2250 mm (63, 74 ¾ ja 88 ½ tuumaa). Basic on saatavana 1900 mm:n (74 ¾ tuuman) koossa.

TUOTETIEDOT

Tekniset tiedot - hydraulinen

Suurin sallittu kokonaiskuorma	175 kg (375 lbs)
Potilaan enimmäispaino	150 kg (330 lbs)
Noston säätövara	320 mm (12 ½ tuumaa)
Korkeus, tason yläasento	740-1060 mm (29-41 ¾ tuumaa)
Paino	74 kg (163 lbs)
Paino Basic	72 kg (159 lbs)
Leveys, taso	650 mm (25 ½ tuumaa)
Kokonaisleveys (ml. sivutuet)	760 mm (30 in)
Kokonaispituus (eri tasopituuksia)	1600 mm, 1850-1950 mm, 2250 mm (63 tuumaa, 73-76 ¾ tuumaa, 88 ½ tuumaa)
Rungon pituus (ml. pyöräkehys)	980 mm (38 ½ tuumaa)
Rungon korkeus	150 mm (6 tuumaa)


Tekniset tiedot - sähköinen

Suurin sallittu kokonaiskuorma	175 kg (375 lbs)
Potilaan enimmäispaino	150 kg (330 lbs)
Noston säätövara	300 mm (11 ¾ tuumaa)
Korkeus, tason yläasento	740-1040 mm (29-41 lbs)
Paino	79 kg (163 lbs)
Leveys, taso	650 mm (25 ½ tuumaa)
Kokonaisleveys (ml. sivutuet)	760 mm (30 in)
Kokonaispituus (eri tasopituuksia)	1600 mm, 1850-1950 mm, 2250 mm (63 tuumaa, 73-76 ¾ tuumaa, 88 ½ tuumaa)
Rungon pituus (ml. pyöräkehys)	980 mm (38 ½ tuumaa)
Rungon korkeus	150 mm (6 tuumaa)

TILAVAATIMUKSET

Sininen alue osoittaa henkilökunnan tarvitseman vähimmäis-työskentelyalueen, joka tarvitaan mekaanisten apuvälineiden käyttöön ergonomisella tavalla yhdeltä puolelta.

Vaaleansininen alue osoittaa tarvittavan työskentelyalueen laajennuksen, joka helpottaa toimimista kummaltakin puolelta ja takaa riittävän tilan.

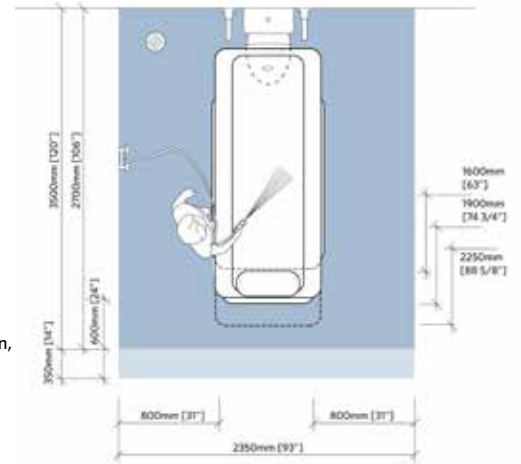

Suihkuvaunussa olevan potilaan suihkuttaminen edellyttää, että hoitajilla on tilaa vaunun molemmilla puolilla. Lisätila pääpuolella mahdollistaa liikkumisen vaunun ympäri ja potilaan hiusten pesemisen. Liikuteltava ja sekoittimella varustettu suihkuhana, jossa on pitkä suihkuletku ja liipaisinkahva, takaa optimaalisen toiminnallisuuden. Hygieniasyistä ja inkontinenssipotilailla on suositeltavaa, että suihkuvaunu tyhjennetään WC:hen tai erilliseen huuhteluallasjärjestelmään. Suihkuvaunua varten oviaukon leveyden on oltava 1000 mm (39 tuumaa).