

MOBILER PASSIVLIFTER

Maxi 500®



Der Maxi 500 Bodenlifter wurde entwickelt, um Pflegekräfte in Krankenhäusern, Pflegeheimen, in der häuslichen Pflegeumgebung (Homecare) oder anderen betreuten Wohneinrichtungen beim Transfer von pflegebedürftigen Patienten oder Bewohnern zu unterstützen.

ARJO-MOBILITÄTSGALERIE



D



E

© Arjo 2019

D. Ist nicht in der Lage, das eigene Gewicht auf den Füßen zu tragen.
Kann mit ausreichender Unterstützung sitzen.

E. Hat Schwierigkeiten, eine sitzende Haltung beizubehalten; bleibt deshalb liegen/
teilweise im Bett liegen; kann nur in einem speziellen Pflegerollstuhl sitzen.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Arjo.

- **Hubleistung**
Sichere Arbeitslast 227 kg.
- **Vertrautheit**
Erhältlich mit 2-Punkt-Aufhängung oder mit der manuellen 4-Punkt-Aufhängung von Arjo mit dynamischem Positionierungssystem (DPS).
- **Duales Bedienfeld**
Der Maxi 500 wird an der Säule oder mit der Handbedienung gesteuert, wodurch die Pflegekraft bei der Bedienung des Lifters nahe am Patienten/Bewohner bleiben kann.
- **Einfachheit**
Einfach zu verstehen und einfache Bedienung.
- **Waage (optional)**
Die in den Transfervorgang integrierte Waage macht einen zusätzlichen Transfer auf eine feste Waage unnötig und erleichtert die Pflegeroutine, sowohl für die Patienten/Bewohner als auch für die Pflegekräfte.

Ausstattungsmerkmale

WAAGE (OPTIONAL)

Eine optional integrierte Waage unterstützt einen effizienten Wiegevorgang.

LEICHTGÄNGIGE LENKROLLEN

Leichtlenkrollen, mit Bremsen an den Hinterrädern, für einen festen Stand des Lifters während des Transfervorgangs.



STARKE LÖSUNG GEGEN REIBUNG

Diese konstruktive Lösung reduziert ein Hin- und Herschwingen der Aufhängung während des Patiententransfers.

DUALES BEDIENFELD

Die elektrisch betriebenen Funktionen des Maxi 500 können mit der Handbedienung und vom Bedienfeld der Hubsäule aus betätigt werden.

VERSTELLBARES FAHRGESTELL

Das mit der Handbedienung verstellbare Fahrgestell, ermöglicht den Transfer von Patienten in breite Stühle, Rollstühle oder Toiletten/Toilettenstühle.


PRODUKTINFORMATIONEN

Max. sichere Arbeitslast (SAL)	227 kg
Liftergewicht (mit Aufhängung und Akku)	57 kg
Maximale Hubhöhe	1860 mm
Minimale Hubhöhe	650 mm
Hubbereich	1210 mm
Min. Höhe bei Lagerung	1320 mm
Äußere Breite bei geschlossenem Fahrgestell	680 mm
Äußere Breite bei geöffnetem Fahrgestell	1080 mm
Innere Breite bei geschlossenem Fahrgestell	550 mm
Innere Breite bei geöffnetem Fahrgestell	950 mm
Abstand des Fußes zum Boden (oberer Rand der Fußausleger zum Boden)	120 mm
Freiraum unter dem Fahrgestell (Boden bis Unterseite des Gestells)	28 mm
Lifterlänge	1140 mm
Wendekreisdurchmesser	1330 mm
Schutzart Lifter	IP24
Handbedienung, Schutzart	IPX7
Akku	24 V, 4 Ah
Akku-Ladeanzeige	
Betriebsstundenzähler – zeigt die Gesamtbetriebszeit an (Stunden)	
Not-Aus-Schalter und Notablass	
Automatische Sicherheitsabschaltung beim Absenken auf ein Hindernis	
Leichtgängige Lenkrollen, die beiden hinteren mit Feststellbremsen	

ZUBEHÖR

- 2-Punkt-Aufhängung
- Manuelle 4-Punkt-Aufhängung mit dynamischem Positionierungssystem (DPS)
- Großes Angebot an Spezial- und Einweggurten
- Optional: Waage
- Arjo-Desinfektionsmittel

PLATZBEDARF

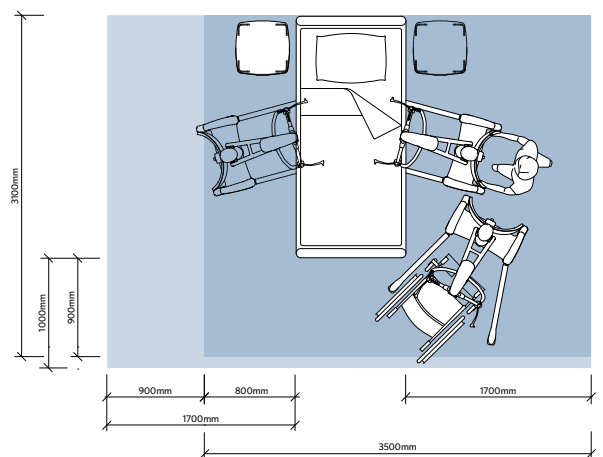

- Der blaue Bereich zeigt den mindestens benötigten Arbeitsbereich, damit die Pflegekraft den Bodenlifter auf ergonomische Weise von einer Seite benutzen kann.
- Der hellblau gefärbte Bereich zeigt die zusätzlich benötigte Fläche, wenn an beiden Seiten ausreichend Platz zum Arbeiten und Bewegen für Bewohner/Patient, Bodenlifter und Pflegekraft zur Verfügung stehen soll.

November 2019. Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe.
 Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
 Arjo Deutschland GmbH • Peter-Sander-Straße 10 • 55252 Mainz-Kastel • Deutschland • +49 6134-186 0
 Arjo AG • Fabrikstrasse 8/Postfach • 4614 Hängendorf • Schweiz • +41 (0) 61 337 97 77
 Arjo Austria GmbH • Lemböckgasse 49A • 1230 Wien • Österreich • +43 (1) 866 56