



TRYKKSKADEFOREBYGGING

Produktopplæring: Provizio[®] SEM Scanner

Sammendrag

- 0 Før du begynner
- 1 Oppstart
- 2 Driftsmodus
- 3 Skann
- 4 Tilbakestill
- 5 Rengjør
- 6 Dataopplasting
- 7 Lade og slå av



0

1

2

3

4

5

6

7

Før du begynner

Aktiveringsknapp
(på enheten)



Sensor

Pasient-ID

Statusindikator

SEM-delta



Scanner for
pasientstrekkode*

Batterimåler

SEM-verdi

Ladestasjon

* Tilgjengelig i Provizio V2

Oppstart

Slå på Provizio SEM Scanner

Ved å fjerne fra
ladestasjonen
eller
Ved å trykke på
aktiveringsknappen
til skjermen tennes
og startskjermbildet vises


Sensorhodet må ikke
berøres mens dette pågår



Installere sensoren




Etter ca. 4 sekunder vises skjermbildet
for å **installere sensoren**

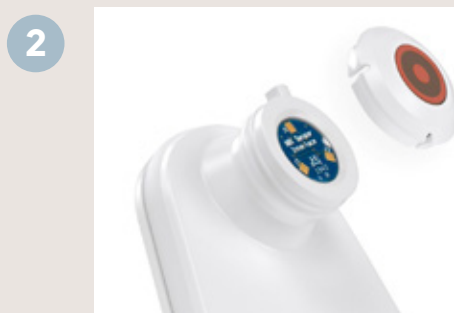

Fjern engangssensoren for Provizio SEM Scanner
fra emballasjen, og sett den på sensorhodet.
Du hører et klikk når sensoren er riktig plassert

Hver pasientskanning krever en ny sensor

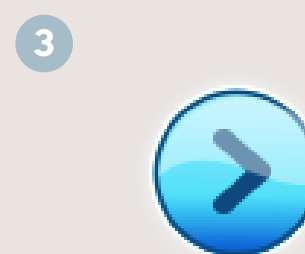

Trykk på **Neste skjerm-knappen** for å fortsette.
Skanneren vil teste installasjonen av sensoren
og deretter vise Driftsmodus-skjermbildet

Driftsmodus

Velg ett av de fire tilgjengelige alternativene (A til D)



Alternativ A: Strekkodeknapp

Hvis du trykker på strekkodeknappen, implementeres full dataopplasting. Bruk denne funksjonen hvis pasienten har et strekkodet håndleddsband og Provizio SEM Scanner Gateway Dashboard er installert på Wi-Fi-nettverket.




1

Trykk på strekkodeknappen i skjermbildet for strekkodeskanning.




2

Plasser skanneren og bruk det grønne lyset til å rette strekkodeleseren mot pasientstrekkoden.

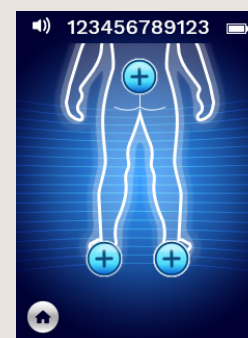

Når skanneren har identifisert strekkoden, vil den avgi et kort lydsignal og skjermbildet for valg av plassering på kroppen vises.

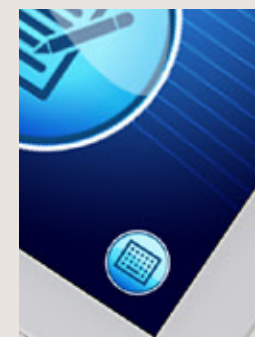

Hvis strekkoden ikke kan skannes, kan du skrive inn pasient-ID-en manuelt ved å trykke på knappen Manuell pasient-ID (alternativ C) nederst til høyre.

Driftsmodus

Velg ett av de fire tilgjengelige alternativene (A til D)



Alternativ B: Knapp for manuell journalføring

Hvis du trykker på knappen Manual Charting, starter manuell driftsmodus. Brukes når pasienten ikke har et hånleddsband med strekkode, eller du ikke har Gateway-dashbordet installert på WiFi-nettverket



Alternativ C: Manual Patient ID-knapp (nedre høyre hjørne)

Hvis du trykker på knappen for manuell pasient-ID i nedre høyre hjørne, kan du angi pasient-ID manuelt via et tastatur på skannerskjermen




Alternativ D: Training-knapp (nedre venstre hjørne)

Hvis du trykker på Training-knappen i nedre venstre hjørne, starter en testmodus kun for opplæring



Skann

Velg kroppsområdet du vil skanne ved å trykke på valgknappen

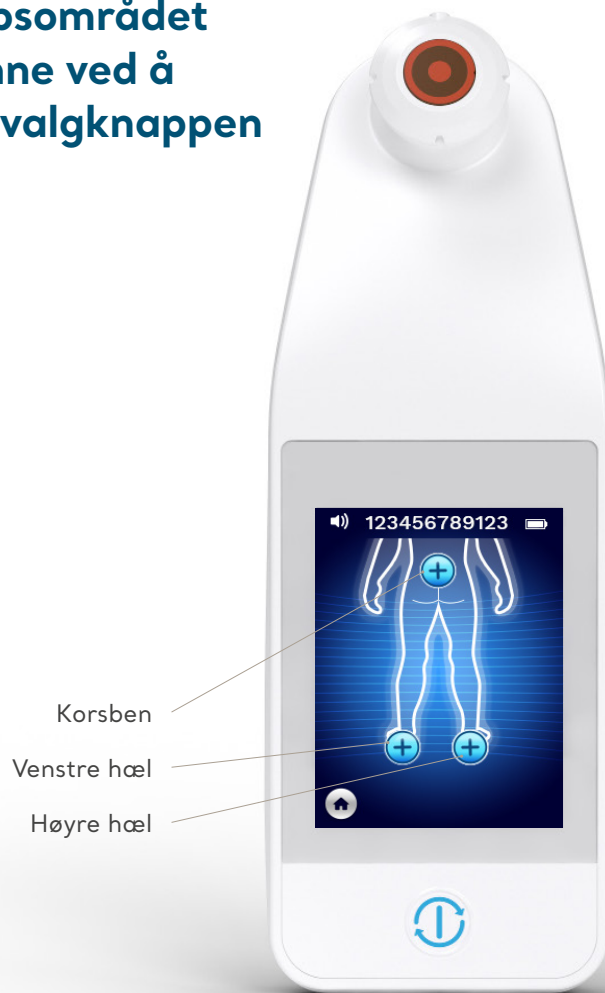


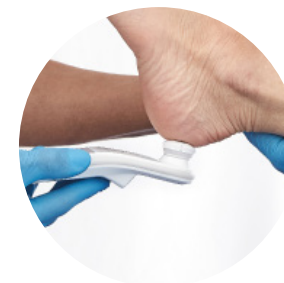
Korsben

Venstre hæl

Høyre hæl

Slik skanner du

- A Sørg for at eventuell fuktighet eller materiale på overflaten fjernes fra området på huden som vurderes
- B Legg sensorhodet flatt mot pasientens hud i området som skal skannes, med tilstrekkelig trykk, til skanningen utløses
- C Når en vellykket avlesning er utført, blinker skanneren blått og avgir et kort lydsignal
- D Løft sensoren av huden. Øktsirklene under kroppsplasseringen vises fullstendig fylt ut når målingen er fullført
- E Gjenta trinnene ovenfor for å få et komplett sett med avlesninger
- F Symbolet Δ viser en verdi når tre avlesninger er foretatt
- G $\Delta \geq 0,6$ kan antyde økt risiko for trykkskader. Verdien bør vurderes i forbindelse med klinisk vurdering
- H Trykk på Body Location Screen-knappen  Gjenta skanneprosessen for de gjenværende kroppsområdene



Her kan du skanne

Korsbenavlesninger:

Fullfør seks (6) Provizio SEM Scanner-avlesninger i posisjonene som vises i figuren

Avlesningen ① foretas like over glutealkløften, rundt S3 på korsbenet. Start alltid skanningen av korsbenet med avlesningen ① som er angitt i figuren.

Avlesning ②, ③ og ④ foretas med lik avstand over benutspringet til korsbenet

Avlesning ② tas ca. 1,5 cm til venstre for sentrum for avlesningen ①

Avlesning ③ tas ca. 1,5 cm over sentrum for avlesningen ①


Avlesning ④ tas ca. 1,5 cm til høyre for sentrum for avlesningen ①

Avlesning ⑤ og ⑥ tas utenfor korsbenområdet

Avlesning ⑤ tas ca. 4,5 cm til venstre for sentrum for avlesningen ①

Avlesning ⑥ tas ca. 4,5 cm til høyre for sentrum for avlesningen ①

Det er ikke nødvendig å ta avlesning ② til ⑥ i den angitte rekkefølgen – men avlesning ① må tas først på stedet som vises i bildet

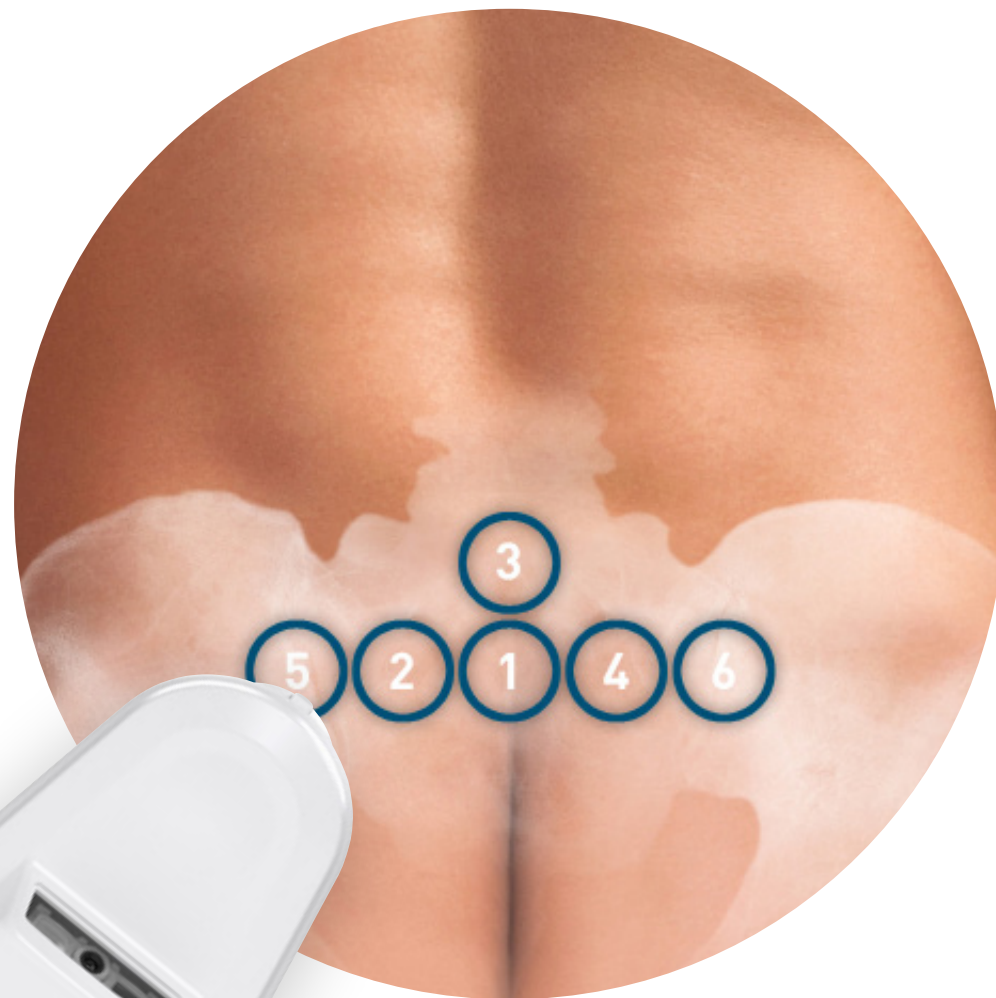

Her kan du skanne



Ytterhæl



Innerhæl



Hælpute



Baksiden av hælen

Hælavlesning:

Fullfør fire (4) Provizio SEM Scanner-avlesninger for hælen som skannes (én hæl om gangen) som vist i de fire figurene. Unngå å plassere Provizio SEM Scanner på hard eller skadet hud på hælen (f.eks. en hæl med trærer). Skannerekkefølgen på hver hæl er ikke relevant, men det må tas minst tre skanninger for at en delta skal vises.

Lateral (ytre) side av hælene:

- Gjør én (1) Provizio SEM Scanner-avlesning på siden av hælen med skanneren plassert rundt hælbenet
- Lateral side er samme side som lilletåen (femte tå)
- Unngå å plassere Provizio SEM Scanner på den laterale malleolus

Medial (indre) side av hælene:

- Gjør én (1) Provizio SEM Scanner-avlesning på medial side av hælen med skanneren plassert rundt hælbenet
- Medial side er den samme siden som stortåen (første tå). Unngå å plassere Provizio SEM Scanner på den mediale malleolus

Hælputen (hælsålen):

Gjør én (1) Provizio SEM Scanner-avlesning på hælputen (hælsålen) av hælen med skanneren på bakkanten av hælen

Baksiden av hælene:

Gjør én (1) Provizio SEM Scanner-avlesning på baksiden av hælen med skanneren plassert rundt hælbenet Unngå å plassere Provizio SEM Scanner på akillessenen



Tilbakestill

Når alle steder på kroppen er fullført:


- 1 Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til Install sensor-skjermbildet
- 2 Hvis Gateway er installert, vil skanneren lagre og oppbevare alle avlesninger i kryptert form til de lastes opp på Gateway-dashbordet
- 3 Hvis du bruker alternativet Manual Charting (manuell journalføring), slettes SEM-avlesningene når skanneøkten avsluttes
- 4 Fjern sensoren ved å dra den forsiktig bort fra sensorkontakten
- 5 Hver pasientskanning krever en ny sensor



Rengjøre og desinfisere

Rengjør og desinfiser Provizio SEM Scanner ved å følge prosedyren for rengjøring og desinfeksjon i brukerhåndboken.

Installer en ny sensor hvis du starter en annen skanneøkt.

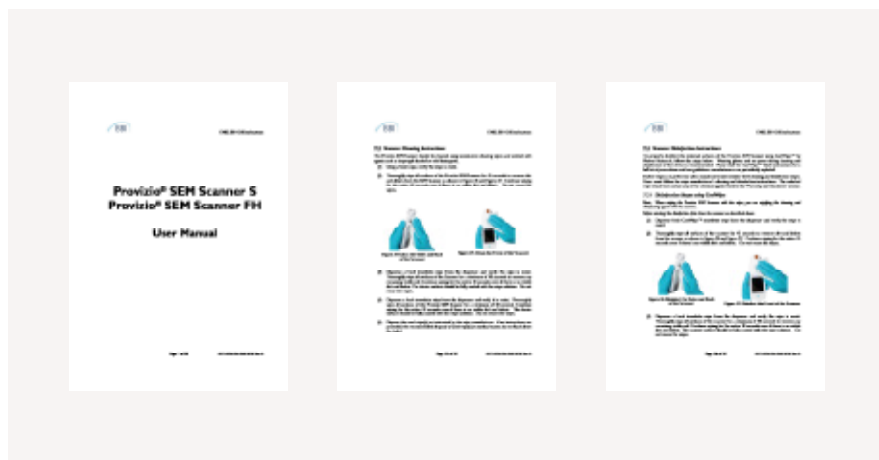

Dataopplasting

Gateway installert

Slik laster du opp avlesningene:

- 1 Plasser Provizio SEM Scanner i ladestasjonen. Skanneren starter trådløs kommunikasjon og kobler til Gateway-dashbordet
- 2 Alle lagrede, krypterte dataøkter lastes opp til Gateway-dashbordet og slettes fra skanneren



Lade og slå av

Plasser skanneren på ladestasjonen for å lade

- Ladelyset på ladestasjonen begynner å blinke grønt
- Berøringsskjermen er deaktivert mens skanneren er på ladestasjonen



Skjermen viser status for opplasting av data og batteriets ladenivå. Skanneren er fulladet når fem grønne streker lyser


Skanneren kan slås av ved å trykke på og holde inne aktiveringsknappen

Batteritiden til Provizio SEM Scanner er ca. 3 timer med aktiv skanning.





Demonstrasjonsvideo for Provizio SEM Scanner

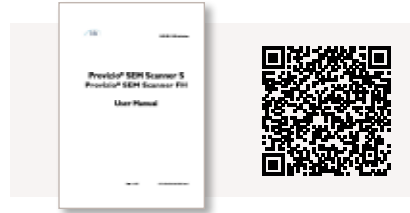

Provizio SEM Scanner Brukerhåndbok

Se bruksanvisningen for Provizio SEM Scanner
online ved å skanne QR-koden

Provizio® SEM Scanner produseres av Bruin Biometrics LLC og distribueres under kontrakt av Arjo AB. Opphavsrett, varemerker og logoer tilhører Bruin Biometrics LLC, inkludert følgende: Bruin Biometrics LLCs opphavsrettslig beskyttede materiell for Provizio® SEM Scanner og SEM Scanner® kan ikke brukes eller reproduseres uten skriftlig samtykke fra Bruin Biometrics LLC.
© Arjo, 2021

Vi i Arjo mener at tilrettelegging for bevegelse er avgjørende for pleiekvaliteten i helsesektoren. Våre produkter og løsninger er utviklet for å fremme en trygg og verdig opplevelse gjennom pasientforflytning, sykehussenger, personlig hygiene, desinfisering, diagnostikk og forebygging av trykkskader og venøs tromboemboli. Vi har over 6000 ansatte over hele verden og mer enn 60 års erfaring med pasientpleie og helsepersonell, og jobber for å skape bedre helse hos mennesker som står overfor utfordringer knyttet til mobilitet.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo Norge AS · Olaf Helsets vei 5 · 0694 · Oslo · Norway · +47 22 08 00 50

www.arjo.com

arjo