

ET AVANSERT STÅ- OG OPPREISNINGSHJELPEMIDDEL

Sara® Plus



Sara Plus er et elektrisk drevet stå- og oppreisningshjelpemiddel for aktive forflytninger og balanse-, stå- og gåtrening.

ARJOS MOBILITETSGALLERI



C



D

© Arjo 2019

C. Delvis i stand til å bære vekt, på minst ett ben.
Bruker rullestol for å flytte seg over avstand.

D. Kan ikke bære vekt på føttene. Kan sitte med god støtte.
Kontakt Arjo hvis du ønsker mer informasjon.

• Økt mobilitet gjennom trening

Sara Plus har avtakbar fotplate og støtter via armstøtten og seilet, og er designet for å støtte balanse-, stå- og gåtrening.

• Overkroppsstøtte

Armstøtten er en integrert del av løftemekanismen, og gir ekstra støtte til overkroppen under oppreisningen.

• For én pleier

Sara Plus er designet for å håndteres av én enkelt pleier, og kan være en kostnadseffektiv løsning for stående forflytning, stå- og gåtrening.

• Seilløsninger

Seilet er designet spesifikt for Sara Plus. Det er trygt festet til løfteren, og holder og støtter pasienten eller beboeren nær armstøtten. Ulike seiltyper er tilgjengelige: ståseil, forflytnings-/gåseil og avtørkbare seil.

• Vekt som tillegg

Innebygd vekt finnes som tilleggsutstyr, og det bidrar til enklere veierutiner.

Viktige funksjoner

ARMSTØTTE

Armstøtten støtter pasientens armer og overkropp, og kan hjelpe pasienten å støtte opp vekten med skuldrene i tillegg til føttene.

PROAKTIV PUTE

Den proaktive kneputen gir støtte og stabilitet, og tilrettelegger samtidig for en naturlig, foroverrettet bevegelse i knærne og bøyning i anklene under forflytning til stående eller sittende stilling.

AVTAKBAR FOTPLATE

Den avtakbare fotplaten gir mulighet for stå- og gåtrening med pasientens føtter direkte på gulvet.



DOBLE BETJENINGSELEMENTER

Doble betjeningspaneler på løftemasten og på håndkontrollen. Håndkontrollen gir pleieren mulighet til å bevege seg og holde seg nær pasienten, og opprettholde god blikkontakt gjennom hele prosessen.

VEKT (TILLEGG)

Vekten kan brukes til å veie pasienter og overvåke pasientenes evne til å bære vekt når Sara Plus brukes uten fotplaten.

PRODUKTINFORMASJON

Maks sikker arbeidsbelastning	190 kg
Løfterens vekt (inkl. batteri)	78,7 kg
Min. total oppbevaringshøyde	1195 mm
Min. løftehøyde	906 mm
Maks løftehøyde	1497 mm
Utvendig bredde med lukkede ben	646 mm
Utvendig bredde med åpne ben	1107 mm
Innvendig bredde lukkede ben	534 mm
Innvendig bredde åpne ben	1002 mm
Klaring ben (gulv til overside av ben)	116 mm
Understellets gulvklaring (gulv til undersiden av understellet)	30 mm
Løfterens totale lengde	1033 mm
Svingradius	1235 mm
Løfter, beskyttelsesklasse	IPX4
Beskyttelsesklasse, håndkontroll	IPX7
Batteri	24V, 6 Ah
Batteriindikator	
Serviceindikator – viser den totale driftstiden (timer)	
Nødstoppsfunksjon og overstyring av systemsvikt	
Automatisk utkobling hvis løfteren senkes ned på en hindring	
Lavfriksjonshjul, de to bakre med bremses	

TILLEGGSUTSTYR

Stort utvalg av vaskbare seil, engangsseil og avtørkbare seil

Toalettsete

Smalt fotbrett

Forlengelse til fotbrett

Bred fotpute


Fleecetrek til knepute

Armremmer

Benremmer

Ekstraustyr: Innebygd vekt

PLASSBEHOV

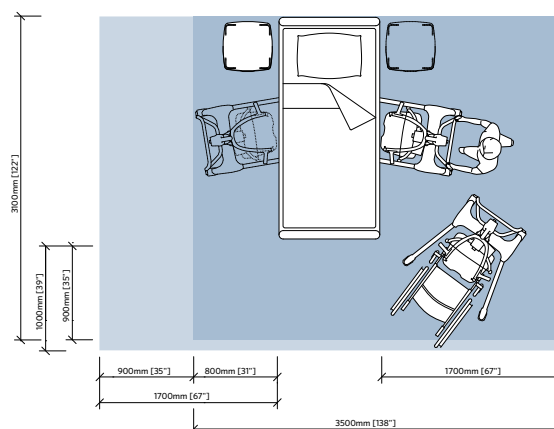

- Det blå området viser minste arbeidsområde som kreves for at pleieren skal kunne bruke det mekaniske hjelpemiddelet på en ergonomisk måte fra én side.
- Det lyseblå området viser hvor mye arbeidsområdet må utvides for å tilrettelegge for aktiviteter på begge sider, og for å gi tilstrekkelig tilgang for pasienten, hjelpemiddelet og pleieren.